

ムレにくく
かぶれにくい

貼る眼帯

【アイパッチ】

販売名:アイパッチ
耳ひも付き眼帯のずれ易さ、はずれ易さを解消する「貼る眼帯」です。

【特徴】

- ムレにくく、ソフトで通気性のある不織布を使用しております。
- かぶれにくい糊を使用しております。(かぶれの少ない糊を使用しておりますが、すべての方にアレルギーや皮膚刺激が起きないわけではありません)
- 内側のパッドは遮光型にしております。
- 耳ひもがありませんので、眼鏡をご使用の方に便利です。
- 左右どちらの眼にも使用できます。

使用方法

- はくり紙をはがして貼る眼帯を取り出し、幅の狭い方を鼻側に向け、眼と眉を同時に覆うようにして、端にシワやすき間ができないように貼り付ける。
- 眼帯として使用する場合は、ガーゼ等に薬をつけてパッドに乗せて貼り付ける。
- 視力矯正・訓練用として使用する場合は、良い方の眼にそのまま貼って覆い、悪い方の眼で一日数時間生活する。
- その他の使用方法として、靴ずれ防止パッドとしてもご使用頂けます。

製造
番号
使用
期限

大人用 30枚入り

実サイズ 76×53mm
(パッド 52×32mm)

注意

- 1.使用に際しては、次のことに注意してください。
 - (1)貼る前に、眼と眼の周り、手を清潔にして使用してください。
 - (2)洗顔などでパッド部分が濡れた場合には貼り替えてください。
 - (3)傷や湿疹、かぶれ等のある部位には使用しないでください。
 - (4)過敏症の方は、使用前に皮膚の柔らかい部位(脇の下や太腿部の内側等)に貼り、かぶれを生じないか確認後に使用してください。
 - (5)どちらの眼に使用するか、また一日に何時間使用するかは眼科医に相談してください。
- 2.本品の使用は1回限りとし、再使用はしないでください。
- 3.使用中または使用後は、次のことに注意して使用してください。
 - (1)本品の使用により、発疹、発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が現れた場合には、使用を中止し、医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください。
 - (2)本品使用中の歩行、特に階段の昇り降りには注意してください。
 - (3)本品使用中の車等の運転は危険ですのでしないでください。
- 3.保管及び取り扱いに際しては、次のことに注意してください。
 - (1)幼児の手の届かないところに保管してください。
 - (2)直射日光を避け、なるべく湿気の少ない涼しいところに保管してください。
 - (3)使用期限を過ぎた製品は、使用しないでください。
 - (4)子供に使用する場合は、サイズをご確認の上、「子供用」をご使用ください。

製造販売元
大洋製薬株式会社
東京都文京区本郷3-14-16
大洋製薬お客様相談窓口
☎0120-184328
受付時間 午前10時～午後5時(土・日曜、祝祭日除く)

J18-AS

貼る眼帯 大人用 30枚入り
【アイパッチ】 色:ホワイト

ムレにくく
かぶれにくい

貼る眼帯 大人用 30枚入り
【アイパッチ】 色:ホワイト

ムレにくく
かぶれにくい

貼る眼帯
【アイパッチ】

- ✓ 仮眠用アイマスクとして
- ✓ 斜視・弱視、視力矯正の訓練用に
- ✓ 一般的な貼る眼帯として
- ✓ 靴ずれ防止パッドとして

実サイズ
76×53mm
(パッド52×32mm)

滅菌済 耳ひも付き眼帯のずれ易さ、
はずれ易さを解消する
「貼る眼帯」です。

貼る眼帯 大人用 30枚入り
【アイパッチ】 色:ホワイト

30枚入り

