

増量!!

128mL



やさしさアップ!  
洗浄力アップ!

O<sub>2</sub> C.L.ケア  
オーツー シー.エル.ケア

主成分

両性界面活性剤

容量

128mL

市販の「O<sub>2</sub>酵素クリーナー」との  
組み合わせで、つけ置き洗いが  
できます。

すべてのO<sub>2</sub>・ハードレンズに  
使える洗浄保存液

- すべてのハードレンズに使えます
- 簡単、経済的 うれしい128mL
- 優れた洗浄力にやさしさを+α
- やわらかく、注ぎやすいボトル
- 側面に残量がわかる小窓付
- キャップを強くしめると初めて開封する、  
完全無菌包装だから、清潔です

税込価格 840円  
(税別) 800円

点線部分で切り取り、POPとしてお使いください。

増量!!

やさしさアップ!  
洗浄力アップ!

128  
mL

O<sub>2</sub> C.L.ケア  
オーツー シー.エル.ケア

128mL

すべてのO<sub>2</sub>ハードレンズに使える、洗浄保存液

¥



大洋製薬株式会社 東京都文京区本郷3-14-16

# O<sub>2</sub>C.L.ケア

オーツーシー.エル.ケア

商品名

O<sub>2</sub> C.L.ケア

容量

128mL

成分

主成分：両性界面活性剤  
配合成分：ホウ酸・ホウ砂・塩化ナトリウム  
エデト酸ナトリウム

商品特徴

- 簡単、経済的 うれしい128mL
- 優れた洗浄力にやさしさを+α
- やわらかく、注ぎやすいボトル
- 側面に残量がわかる小窓付
- キャップを強くしめると初めて開封する、完全無菌包装だから、清潔です

## 【使用方法】 ●こすり洗いの場合

レンズの両面にO<sub>2</sub>C.L.ケアを数滴つけて、爪がレンズに触れないように、指の腹でこするようにして洗います。

2  
レンズを水道水ですすぎます。

3  
レンズを水中ケースのホルダーに収納し、新しいO<sub>2</sub>C.L.ケアの入った水中ケースに保存します。

4  
レンズを装着するときは、水中ケースからレンズを取り出します。

5  
水道水ですすいで、レンズを装着します。

## ●つけ置き洗いの場合

1

レンズを目からはずしてレンズケースにセットします。

2

レンズケースにO<sub>2</sub>C.L.ケアを9分目まで注ぎ「O<sub>2</sub>酵素クリーナー」を1・2滴加え4時間以上保存します。

3

ケースからレンズを取り出し、水道水でよくすすいでから装着します。

## 【規格表】

商品名	希望小売価格	JAN	サイズ(mm)・重量・入数	ITFコード	使用期限
O <sub>2</sub> C.L.ケア 128mL	税込価格 840円 (税別 800円)	単品のJANコードです	単品 高さ162×幅41×奥行41 150g	010 4975175 03541 4	36ヶ月
		 4 975175 035415	中箱 (10本入) 高さ167×幅210×奥行87 1,572g		
			外箱 (100本入) 高さ360×幅455×奥行225 16,260g		
3本パック O <sub>2</sub> C.L.ケア 128mL	税込価格 2,520円 (税別 2,400円)	3本パックのJANコードです	単品 高さ162×幅123×奥行41 450g	010 4975175 03561 2	36ヶ月
		 4 975175 035613	外箱 (40パック入) 高さ355×幅450×奥行260 18,700g		

## すべてのO<sub>2</sub>・ハードレンズに使えます

たとえば…

メニコン：メニコンZ・メニコンスーパー EX・メニコン EX

シード：シードHi-O<sub>2</sub>・シードスーパーHi-O<sub>2</sub>・シードA-1・シードS-1

ボシュロム：ボシュロムO<sub>2</sub>・ボシュロム EX-O<sub>2</sub>

旭化成アイミー：アイミーサプリーム・アイミーEXプレミアム

HOYA：ホーヤハードEX

クラレ：クララスーパー・オーEX・クララスーパー・オーII

カービジョン：ハード EX1

ニチコン：ニチコンRZX・ニチコンEX-UV

東レ：プレスオーハードCL

アイシティー：アイシティーEX-α

## 脂質洗浄力テスト (当社調べ)

処理前

O<sub>2</sub>C.L.ケア



レンズに付着した脂質



処理後



洗浄保存液A

販売元



大洋製薬株式会社

東京都文京区本郷3-14-16

ご相談窓口：製品に対するお問い合わせは大洋製薬(株)へ

フリーダイヤル 0120-184328

受付時間：午前10時～午後5時[土・日曜祝祭日は除く]

発売元 旭化成アイミー株式会社

点線部分で切り取り、POPとしてお使いください。