

抗菌

洗浄感 UP!!

O₂ C.L.ケアプラス

O₂・ハードコンタクトレンズ用洗浄保存液

すべてのO₂・ハードレンズに使えます。



 抗菌効果

 洗浄感アップ

 うるおいアップ

主成分：両性界面活性剤

配合成分：等張化剤、緩衝剤、エデト酸ナトリウム

容量：120mL

発売元



大洋製薬株式会社

東京都文京区本郷3-14-16


抗菌効果

抗菌効果プラスで、細菌類をシャットアウト!

新たな性能として抗菌効果をプラスしました。レンズケースのヌメリ、においの原因となる細菌の繁殖を抑制し、保存中のレンズやケースを清潔に保ちます。

細菌類の繁殖を抑制! レンズやレンズケースを清潔に保ちます!

「生理食塩水」と「O₂C.L.ケアプラス」、各々に常在菌を培養した菌液を接種し、寒天培地にて5日間培養を行って比較しました。

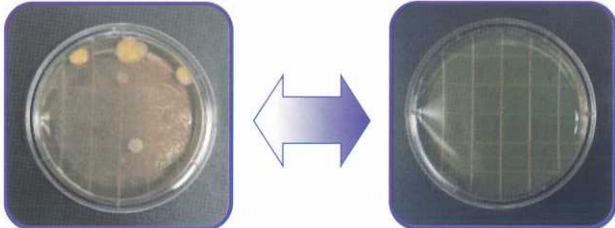


※ 生理食塩水

※ O₂C.L.ケアプラス

細菌及び真菌に対し高い抑制効果! 細菌類からレンズを守る!

細菌及び真菌に対し、総じて高い抑制効果を示しました。

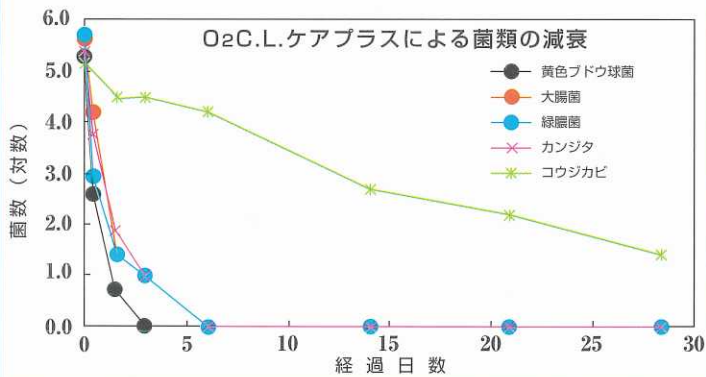


うるおいアップ

うるおい成分PVP配合で、快適な装用感!

レンズに親水性(うるおい)を与えるポリビニルピロリドン(PVP)が配合され、レンズにうるおい感を与えます。装用時のゴロゴロ感をおさえ、快適な装用感が得られます。

レンズにうるおいを与え、 快適な装用感が得られます!

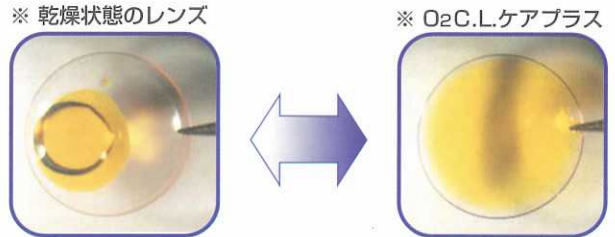

乾燥状態で水はじきが観察されていたレンズを、O₂C.L.ケアプラスに8時間浸漬したところレンズの水濡れ性は顕著に改善されました。

優れた水濡れ性付加効果!

自動接触角計による接触角(水中気泡方)測定からもO₂C.L.ケアプラスの顕著な水濡れ性付与効果が確認されました。

	接触角(度)
乾燥状態にあったレンズ	56
O ₂ C.L.ケアプラスに1日浸漬した後のレンズ	29

うるおい膜がレンズを包み快適な装用感を実現!

うるおい成分PVPの「うるおい層」がレンズ表面を包み込み、脂質汚れの付着、レンズのくもり、乾燥感などを抑制し、自然で快適な装用感が得られます。



すべてのO₂ハードコンタクトレンズに使用できます。

※日本コンタクトレンズ協会の定めるケア用品安全自主基準に基づき適合性試験を実施し、適合性を確認いたしました。
適合試験済みの主なO₂ハードコンタクトレンズは製品側面に記載しております。
また、新しく市販されるレンズに関しても適宜、適合試験を実施しています。

洗浄感アップ

レンズに親水性(うるおい)を与えるポリビニルピロリドン(PVP)が配合されています。これにより、洗浄感がアップし快適な装用感が得られます。

【規格表】

商品名	希望小売価格	JAN	サイズ(mm)・重量・入数	ITFコード	使用期限
抗菌 O ₂ C.L.ケア プラス 120mL	税込価格 945円 (税別 900円)	単品のJANコードです  4 975175 035262	単品 高さ140×幅41×奥行41 141g	010 4975175 03526 1	36ヶ月
			中箱 (10本入) 高さ141×幅212×奥行86 1468g		
			外箱 (100本入) 高さ307×幅234×奥行461 15240g		
抗菌 O ₂ C.L.ケア プラス 120mL 3本パック	税込価格 2,835円 (税別 2,700円)	3本パックのJANコードです  4 975175 035286	単品 高さ140×幅123×奥行41 427g	010 4975175 03528 5	
			外箱 (40パック入) 高さ307×幅270×奥行433 17690g		

発売元



大洋製薬株式会社

東京都文京区本郷3-14-16

ご相談窓口: 製品に対するお問い合わせは大洋製薬(株)へ

フリーダイヤル 0120-184328

受付時間: 午前10時~午後5時[土・日曜祝祭日は除く]