

これ1本で

らくらく レンズケア

ワンタッチキャップで使いやすい



抗菌プラス

レンズ・レンズケースを
清潔に保ちます。



うるおい成分
「リピジュア®」配合

うるおい持続・快適な装用感、曇りを防止、
クリアな視界。「リピジュア®」配合



つけおき1液タイプ

これ1本ですべてのハードレンズに使える
洗浄・保存・タンパク除去。
酵素の力をしっかりキープ

抗菌
プラス

すべてのハードコンタクトに!!

O₂ HARD1

オーツーハードワン

オープン価格 酵素配合 洗浄・保存液
容 量：120mL
主成分：タンパク質分解酵素
陰イオン界面活性剤
MPCポリマー（リピジュア®）

発売元



大洋製薬株式会社
東京都文京区本郷 3-14-16

禁点眼

O₂HARD1

うるおい成分
抗菌効果プラス
酵素パワーをキープ




洗浄と保存、タンパク除去までO₂ハードコンタクトレンズに毎日必要なケアが、「O₂HARD1」1本でできます。落ちにくいタンパク汚れも、酵素パワーで分解！うるおい成分「リビジュア®」により、装用中のくもりや、ゴロゴロ感を抑えます。さらに、細菌類の繁殖を抑制し、レンズやケースを清潔に保ち、快適なコンタクト・ライフが過ごせます。

① 高いうるおい効果


医薬品・化粧品などへも利用され、高い生体適合性を持つ、うるおい成分「リビジュア®」が、ハードレンズの装用感を良くし、目の中の乾燥を防ぎます。また汚れの付着や、くもりが防止され、クリアな視界が持続します。

イメージイラスト

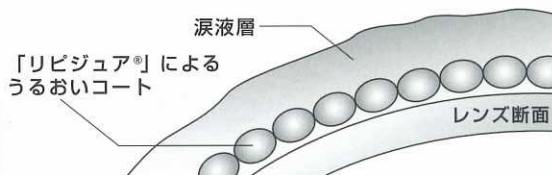


② 優れた洗浄効果

落ちにくいタンパク汚れは、
酵素のパワーで分解・洗浄!!

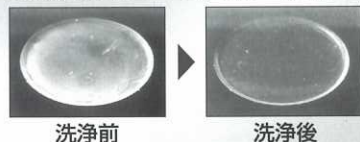


しつこいあぶら汚れもきっちり洗浄!!

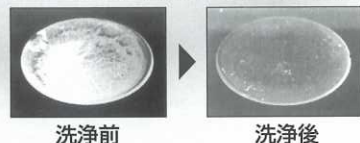

使い方はこんなに簡単!!

★ 夜、レンズをはずすとき

O₂HARD1 をレンズケースの9分目まで満たし、目からはずしたレンズをセットし、翌朝まで漬け置きます。

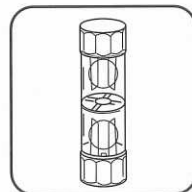

★汚れが気になる方は、本液でこすり洗いをを行うとより効果的です。

☀ 朝、レンズをつけるとき

レンズをホルダーに収納したまま、水道水で十分にすすいでから装用します。



★この時、指でレンズをこすりません。

装用中にレンズを 一時的にはずしたとき

O₂HARD1 数滴をレンズにつけて、軽くこすり洗いをし、水道水でよくすすいでから、装用します。

【規格表】

商品名	希望小売価格	J A N	サイズ(mm)・重量・入数	I T Fコード	使用期限
抗菌 O ₂ HARD1 120m L	オープン	単品のJANコードです 	単品 高さ140×幅56×奥行40 175g	010 4975175 03531 5	36ヶ月
			中箱 (5本入) 高さ141×幅57×奥行201 880g		
			外箱 (50本入) 高さ165×幅435×奥行305 9040g		
抗菌 O ₂ HARD1 120m L 2本パック	オープン	2本パックのJANコードです 	単品 高さ140×幅114×奥行41 353g	010 4975175 03532 2	36ヶ月
			外箱 (25パック入) 高さ165×幅590×奥行222 9200g		

発売元



大洋製薬株式会社
東京都文京区本郷 3-14-16

大洋製薬お客様相談窓口

☎0120-184328

受付時間 午前10時～午後5時(土・日曜、祝祭日は除く)