

ソフト・ハードコンタクトレンズ用

タンパク除去液

簡単リフレッシュ

デイリーアシスト

DAILY ASSIST

特 徴

全てのハード・ソフトコンタクトレンズのタンパク除去に
お使いいただけます。

お使いのオプティフリー・レニュー・コンプリート等の
消毒中に1滴入れるだけで、タンパク除去が簡単に出来ます。

消毒効果を全く損なうことなく簡単・クリアな視界が得られます。

成 分

タンパク質分解酵素

容 量

5mL (約2か月分)

価 格

標準小売価格 1,500円



販売元

大洋製薬株式会社

東京都文京区本郷 3-14-16

ハード・ソフトコンタクトレンズ用タンパク除去液

デイリーアシスト®

商品特徴


すべてのハード・ソフトコンタクトレンズに使用できるタンパク除去液です。
ご家族で、ハード・ソフトコンタクトレンズが違っていても、デイリーアシストなら皆様でご使用になれます。

全てのMPSに・・・

MPS (マルチパーパスソリューション)とは洗浄・消毒・保存・すすぎが1本でできる、ソフトコンタクトレンズ用のケア用品です。デイリーアシストは、MPSと併用する事により、MPSのみで除去しづらいタンパク汚れを強力に除去し、毎日のレンズケアをアシストします。


タンパク除去は必要なの？

汚れ除去率(%)

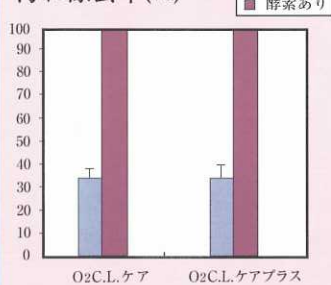


●4時間後では100%の除去率です。

洗浄テスト デイリーアシスト+O2C.L.ケア使用
人工汚れレンズ 2時間つけ置き洗浄

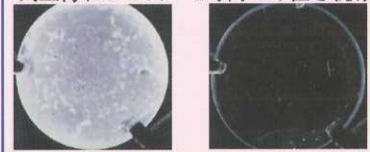

●デイリーアシストはタンパク質分解酵素としてサブチリシンを採用。タンパク質をバラバラに分解し、レンズに固着するのを防ぎます。使い方はとても簡単で、お使いの洗浄液・MPSに一滴入れるだけ！簡単だから毎日正しくケアできます。

コンタクトレンズ障害の割合

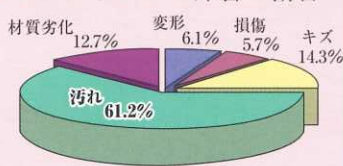

●近年のコンタクトレンズは装用感や酸素透過性を向上させる為、汚れに対して非常にデリケートにできています。日本眼科医会の調べによると、コンタクトレンズ自体の障害の割合で最も多い原因は汚れに起因するもので、61.2%を占めています。特にタンパク汚れを放って置くとコンタクトレンズに固着・堆積し、眼病の原因になります。そこで、酵素でタンパク質を分解しコンタクトレンズをリフレッシュする必要があります。

1)日本の眼科 71巻: 1481-1484 (2000)

ソフトレンズをMPSと一緒に使用する場合

- オプティ・フリー ● オプティ・フリープラス ● レニュー
- コンプリート ● アイネス ● フレッシュルックケア



① レンズケースの右側(R)と左側(L)に「デイリーアシスト」底部ボタンを押して一滴ずつ入れます。




② レンズケースにMPSを8～9分目まで入れます。
③ 目から外したレンズを手のひらに乗せ、MPSで十分にすすぎます。



④ レンズをケースに収め、キャップをしっかりと締め、軽く振ります。そのまま4時間以上放置します。(この間にレンズの消毒とタンパク除去が同時に行われます。)
⑤ レンズをレンズケースから取り出し、MPSでよくすすいだ後、左右を確認して装用します。

O2・ハードレンズをつけ置き洗いの場合

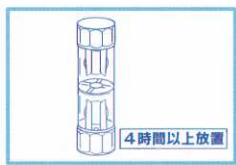

① 夜、目からレンズを外し、レンズケースにセットします。

② レンズケースに「O2C.L.ケア」を9分目まで注ぎ、「デイリーアシスト」を一滴加え、4時間以上保存します。



③ 朝、ケースからレンズを取り出し水道水ですすぎ装用します。

商品名	希望小売価格	J A N	サイズ(mm)・重量・入数	I T Fコード	使用期限
デイリーアシスト	1,500円	単品のJANコードです 	単品 高さ102×幅48×奥行40 45g		37ヶ月
		中箱（10本入） 高さ107×幅208×奥行102 460g			
		外箱（100本入） 高さ228×幅540×奥行225 4800g	010 4975175 03533 9		

販売元



大洋製薬株式会社

東京都文京区本郷3-14-16

製造元

日本油脂株式会社

ご相談窓口：製品に対するお問い合わせは大洋製薬(株)へ
フリーダイヤル 0120-184328
受付時間：午前10時～午後5時[土・日曜祝祭日は除く]