


ムレにくく  
かぶれにくい

# 貼る眼帯

【アイパッチ】

- ✓ 仮眠用アイマスクとして
- ✓ 斜視・弱視、視力矯正の訓練用に
- ✓ 一般的な貼る眼帯として

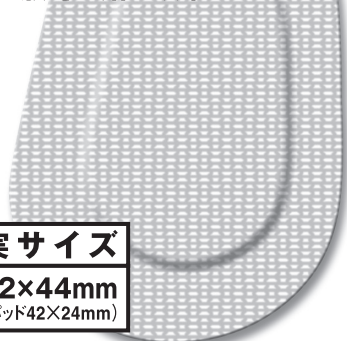

実サイズ  
62×44mm  
(パッド42×24mm)

滅菌済

耳ひも付き眼帯のずれ易さ、はずれ易さを解消する「貼る眼帯」です。

10枚入

子供用

色:ホワイト

子供用 貼る眼帯  
色:ホワイト  
【アイパッチ】



紙  
外箱  
梱包紙



4 975175 022231

## 貼る眼帯 子供用

【アイパッチ】

色:ホワイト

### ムレにくくかぶれにくい 貼る眼帯

【アイパッチ】

子供用 10枚入り

実サイズ62×44mm  
(パッド42×24mm)

販売名:アイパッチ  
耳ひも付き眼帯のずれ易さ、はずれ易さを解消する「貼る眼帯」です。

#### 【特徴】

- ムレにくく、ソフトで通気性のある不織布を使用しております。
- かぶれにくい糊を使用しております。(かぶれの少ない糊を使用しておりますが、すべての方にアレルギーや皮膚刺激が起きないわけではありません)
- 内側のパッドは遮光型にしてあります。
- 耳ひもがありませんので、眼鏡をご使用の方に便利です。
- 左右どちらの眼にも使用できます。

#### 使用方法

- はくり紙をはがして貼る眼帯を取り出し、幅の狭い方を鼻側に向け、眼と眉を同時に覆うようにして、端にシワやすき間ができないように貼り付ける。
- 眼帯として使用する場合は、ガーゼ等に薬をつけてパッドに乗せて貼り付ける。
- 視力矯正・訓練用として使用する場合は、良い方の眼にそのまま貼って覆い、悪い方の眼で一日数時間生活する。
- その他の使用方法として、靴ずれ防止パッドとしてもご使用頂けます。

#### 注意

- 1.使用に際しては、次のことに注意してください。
  - (1)貼る前に、眼と眼の周り、手を清潔にして使用してください。
  - (2)洗顔などでパッド部分が濡れた場合には貼り替えてください。
  - (3)傷や湿疹、かぶれ等のある部位には使用しないでください。
  - (4)過敏症の方は、使用前に皮膚の柔らかい部位(脇の下や大腿部の内側等)に貼り、かぶれを生じないか確認後に使用してください。
  - (5)どちらの眼に使用するか、また一日に何時間使用するかは眼科医に相談してください。
  - (6)本品の使用は1回限りとし、再使用はしないでください。
- 2.使用中または使用後は、次のことに注意して使用してください。
  - (1)本品の使用により、発疹、発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が現れた場合には、使用を中止し、医師または薬剤師にご相談ください。
  - (2)本品使用中の歩行、特に階段の昇り降りには注意してください。
  - (3)本品使用中の車等の運転は危険ですのでしないでください。
- 3.保管及び取り扱いに際しては、次のことに注意してください。
  - (1)幼児の手の届かないところに保管してください。
  - (2)直射日光を避け、なるべく湿気の少ない涼しいところに保管してください。
  - (3)使用期限を過ぎた製品は、使用しないでください。
  - (4)大人に使用する場合は、サイズをご確認の上、「大人用」をご使用ください。



製造販売元  
大洋製薬株式会社  
東京都文京区本郷3-14-16

大洋製薬お客様相談窓口

☎0120-184328

受付時間 午前10時～午後5時(土・日曜、祝祭日を除く)

ムレにくく  
かぶれにくい

# 貼る眼帯

子供用

色:ホワイト

10枚入