

O<sub>2</sub>C.L. ケア

禁点眼

酸素透過性ハードレンズ用の洗浄・保存液です。頑固なタンパク汚れをレンズ保存中に分解洗浄できるタンパク分解酵素洗浄液「O<sub>2</sub>C.L. ケア プロテクリン」との組合せでお使いいただくとさらに効果的です。

【すべてのO<sub>2</sub>・ハードレンズに使えます】

### 使用方法

1. レンズがじゅうぶん浸る量のO<sub>2</sub>C.L. ケアを保存ケースに入れます。
  2. 目からはずしたレンズを保存ケースに入れて、一晚(4時間以上)保存してください。(この間、レンズに付着した汚れを落としやすくします。)
  3. 石けんなどで手をきれいに洗った後、レンズを保存ケースから取り出し、レンズについているO<sub>2</sub>C.L. ケアでこすり洗いをします。
  4. レンズのヌルヌルした感じがなくなるまで水道水でじゅうぶんすすいでから装着してください。
- ※誤った取扱いをするとレンズが使用できなくなるばかりでなく、目に障害を起こす場合がありますので、必ず使用方法に従って使用してください。
- ※レンズの取扱いについては、レンズの添付文書をよく読み、その使用方法などを守ってください。

### 使用上の注意

- 点眼をしないこと。誤って目に入った場合は直ちに流水(水道水)でよく洗い流し、眼科医の診察を受けてください。
- 服用しないこと。誤って口に入れた場合は直ちに水道水でよくすすぎ、医師の診察を受けてください。
- 万一、眼や皮ふに異常を感じたら使用を中止し、医師の診察を受けてください。
- ソフトコンタクトレンズには使用できません。
- 使用後の保存ケース内のO<sub>2</sub>C.L. ケアは捨て、保存ケースは水道水できれいに洗って自然乾燥させ、清潔に保ってください。
- 溶液の汚染を避けるため、ボトルの注ぎ口に、指など触れないでください。また、使用後はキャップをしっかりしめてください。
- 直射日光を避け、お子様の手の届かない所に室温で保管してください。
- 開封後はなるべく早く使いきってください。
- 本液は、消毒液ではありません。
- 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

主成分：両性界面活性剤

販売元：大洋製薬株式会社

東京都文京区本郷3-14-16

フリーダイヤル 0120-184-328

発売元：アイミー株式会社

使用 製造

期限 番号

Made in Japan



容器：PE  
キャップ：PS  
フィルム：PET



AM17-04001

EX-0<sub>2</sub>

## 酸素透過性ハードコンタクトレンズ用 洗浄保存液

すべてのO<sub>2</sub>・ハードレンズに使えます

128mL



つけおき洗いにも、こすり洗いにも

すぐれた洗浄力

お得な128mL

この容器は内溶液の無菌状態を保つため完全密封式となっております。初めて使用される場合、キャップを強くしめるとノズル穴が開き、開封します。